

ofa bamberg

← Voor een eenvoudige en moeiteloze nabestelling vindt u aan de linkerkant **uw persoonlijke kousenpaspoort** met daarin alle benodigde informatie. Gewoon lostrekken, op elkaar plakken en goed bewaren.

Met vriendelijke groet,
Ofa Bamberg

↓ Het memoblad voor uw wasmachine:



Compressiekousen
Op de juiste manier wassen

Binnenstebuiten wassen en geen wasverzachter gebruiken!

- Fijne was
- Niet bleken
- Voorzichtig drogen
- Niet strijken
- Niet chemisch reinigen

Wassen

- Geschikt voor onmiddellijk gebruik
- Aanbeveling: we raden aan om de kousen te wassen voordat u ze voor de eerste keer draagt
- Dagelijks wassen (max. 40 °C), met de hand of met het machinewasprogramma voor fijne was
- Afzonderlijk wassen met fijnwasmiddel (bijv. "Speciaal wasmiddel Ofa Clean"), geen wasverzachter gebruiken
- Goed uitspoelen, voorzichtig centrifugeren, maar niet uitwringen
- Drogen op een handdoek, op een droogrek of met het droogprogramma voor fijne was van de wasdroger, nooit strijken of op de verwarming of in de zon drogen

Materiaalsamenstelling

Er wordt gebruikgemaakt van polyamide (Polyamid), elastaan (Elastan) en katoen (Baumwolle). Voor specifieke informatie verwijzen wij u naar het textiellabel dat in uw kous is genaaid.

Onderhoud

- Droog en het liefst in de originele verpakking opbergen, beschermen tegen direct zonlicht en warmte
- Zorg ervoor dat kousen met hechtbanden met een siliconenlaag niet in contact komen met oplosmiddelen, zalven, crèmes en hydraterende waslotions, omdat de hechting hierdoor permanent kan worden aangetast
- Verzorg uw voeten regelmatig en zorg ervoor dat u de juiste schoenen draagt
- Vezelpluisjes (pilling) is een normaal verschijnsel bij textiel en geen reden voor reclamatie
- Repareer schade aan de kousen nooit zelf, maar breng ze terug naar de winkel waar u ze hebt gekocht

Beoogd gebruik

Compressiekousen worden gebruikt bij de behandeling van flebologische en lymfologische aandoeningen van de armen en benen en bij lipoedeem. Afhankelijk van de indicatie worden verschillende producten gebruikt.

Werkingsprincipe van medische compressiekousen

Met producten die zijn afgestemd op de betreffende indicatie en gecontroleerde druk, wordt de terugstroom van het bloed versneld, wordt de microcirculatie in het weefsel verbeterd en wordt de lymfestroom verhoogd.

Belangrijke informatie

- Draag alleen compressiekousen na overleg met uw arts
- Dagelijks dragen en regelmatige controles zorgen voor een optimaal effect van de behandeling
- De kousen moeten worden verstrekt door medisch geschoold personeel, dat ook advies geeft over de juiste manier waarop de kousen moeten worden aangetrokken
- Neem bij acute pijn uw in benen of bij huidreacties direct contact op met uw arts
- Door de hechtingsband regelmatig een klein stukje te verplaatsen, kunnen huidirritaties worden voorkomen
- Neem in geval van kwaliteitsproblemen of klachten contact op met de dealer

↓ Voor de dealer: Gegevens van de compressiekousen voor uw archief

www.ofa.de
export@ofa.de
Tel. + 49 951 6047-777
Fax + 49 951 6047-186

Ofa Bamberg GmbH
Labanger 20
D-96052 Bamberg

ofa bamberg

Rev. 01-04-2021

Topkwaliteit
van Ofa Bamberg

Uw op maat gemaakte compressiekousen van Ofa zijn het product van jarenlang onderzoek en ontwikkeling. De zorgvuldige verwerking en het hoge kwaliteitsniveau worden gegarandeerd en gecontroleerd door het gebruik van de modernste techniek. Regelmatige certificeringen door onafhankelijke testinstellingen documenteren de verantwoordelijke omgang met onze producten.

Uw op maat gemaakte product van Ofa voldoet bijvoorbeeld aan de strengste kwaliteits- en productvereisten ter wereld (RAL-GZ 387/1). Ook voldoet het product aan de Ofo-Standard 100, de norm die het gebruik van veilige materialen en kleurstoffen voorschrijft.

Wij doen onze uiterste best – om u op de been te houden!

Indicaties (zie ook richtlijn medische compressietherapie AWMF 037/005, stand 17/18)

- Verbetring van veneuze symptomen en kwaliteit van leven bij chronische veneuze aandoeningen
- Preventie en behandeling van veneuze huidveranderingen
- Eczeem en pigmentatie
- Dermatitoposclerose en atrofie blanche
- Behandeling en pijnvermindering bij ulcus cruris
- Venosum, ook recidiefrofylaxie
- Behandeling van artriële en veneuze ulcus cruris (zie contra-indicaties)
- Spataderen
- Posttrombotisch syndroom
- Toestand na trombose
- Veneuze trombose
- Veneuze malformaties
- Veneuze malformaties
- Congestie door immobiliteit (artrogeen)
- Congestiesyndroom, parase en gedeeltelijke parase van de ledematen)
- Werkgereleerd oedeem (staand, zittend werk)
- Geneesmiddelgereleerd oedeem wanneer geen verandering van medicatie mogelijk is
- Oedeem met functionele veneuze insufficiëntie
- Inflammatoire dermatosen van de benen

Contra-indicaties

- Behandeling van littekens
- Toestand na brandwonden
- Zwangerschap

Absolute contra-indicaties:

- Gevoerd perifeer artreeel vaalijden
- Gedecompeniseerd hartfalen
- Rhesusasie coenuea dolens
- Spetische fibrits
- Rhesusasie coenuea dolens
- Rhesusasie coenuea dolens

Relatieve contra-indicaties:

- Onverdraagzaamheid tegen compressiekousmateriaal
- Contra-indicaties)
- Spataderen
- Posttrombotisch syndroom
- Toestand na trombose
- Veneuze trombose
- Veneuze malformaties
- Congestie door immobiliteit (artrogeen)
- Congestiesyndroom, parase en gedeeltelijke parase van de ledematen)
- Werkgereleerd oedeem (staand, zittend werk)
- Geneesmiddelgereleerd oedeem wanneer geen verandering van medicatie mogelijk is
- Oedeem met functionele veneuze insufficiëntie
- Inflammatoire dermatosen van de benen

Garantie

De houdbaarheid van medische compressiekousen is beperkt tot 3 jaar indien ze correct worden bewaard. Daarbij komt nog de draagtijd, die bij regelmatig gebruik en de juiste verzorging maximaal 6 maanden is. Na deze periode zijn de producten uitgesloten van garantie. Gebreken die terug te voeren zijn op normale slijtage resp. onigenschappelijk gebruik zijn principieel uitgesloten van de garantie. Onder onigenschappelijk gebruik vallen ook latere wijzigingen aan het product die niet door de fabrikant zijn uitgevoerd. Het product is bedoeld voor de verzorging van één patient. Als het voor hergebruik wordt doorgegeven aan andere personen, vervalt de productaansprakelijkheid van de fabrikant.

Verwijdering

Gooi het product aan het einde van de levensduur weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Meldplicht

Op grond van wettelijke voorschriften zijn patiënten en gebruikers verplicht om ernstige incidenten die zich hebben voorgedaan in verband met het product en die tot een aanzienlijke verslechtering van de gezondheidstoestand of tot de dood hebben geleid of hadden kunnen leiden, om middellijk te melden aan de fabrikant en de verantwoordelijke nationale autoriteit (in Duitsland BfArM).

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard als deze contra-indicaties worden genegeerd.

Risico's en bijwerkingen

Bij een gevoelige huid kunnen jeuk en huidproblemen ontstaan onder de compressiekousen. Daarom wordt adequate huidverzorging aanbevolen.

Bij de volgende symptomen dient u de kousen onmiddellijk uit te trekken en de voorzetting van de behandeling met de arts te bespreken: blauwe of witte verkleuring van de tenen, sensibiliteitsstoornissen, een doof gevoel, toemenende pijn, kortademigheid, sterke transpiratie, acute bewegingsbeperkingen.

Instucties voor aantrekken, open teen

1. Trek nu de kous zo aan dat de hiel op de goede plek zit. Met de Ofa-aanteknijp is dat heel eenvoudig.
2. Om de aanteknijp uit te trekken, slaat u het voorvoegedeelte van naar voren over de punt van uw voet.
3. Trek de aanteknijp vervolgens rol het voorvoegedeelte van de kous ten slotte over het been totdat deze krekruijt is.

Instucties voor aantrekken, gesloten teen

1. Trek nu het beengedeelte voorzichtig over de hiel. Zorg gelijkmatig omhoog zonder hem ervoor dat u de kous niet aan de bovenkant of antislipboord omhoog trekt.
2. Schuif de rest van de kous gelijkmatig omhoog zonder hem ervoor dat u de kous niet aan de bovenkant of antislipboord omhoog trekt.
3. Schuif de rest van de kous over uw tenen en vervolgens over de bovenkant of antislipboord omhoog trekt.

ofa bamberg