



 Damit Ihre Nachbestellung bei der n\u00e4chsten Verordnung ganz einfach und unkompliziert ist, finden Sie links Ihren persönlichen Strumpfpass mit allen maßgeblichen Informationen. Einfach abziehen, zusammenkleben und gut aufbewahren.

Mit besten Empfehlungen **Ihre Ofa Bamberg** 

## Der Merkzettel für Ihre Waschmaschine:



# Kompressionsstrümpfe

# richtig waschen

### Bitte auf links waschen und keinen Weichspüler verwenden!

Schonwaschgang



Nicht bleichen Schonend trocknen



Nicht bügeln



Nicht chemisch reinigen

#### Waschen

- für den sofortigen Gebrauch geeignet
- Empfehlung: vor dem ersten Tragen waschen - tägliche Wäsche (max. 40°C), von Hand oder im Schonwaschgang der Maschine
- separat mit Feinwaschmitteln (z. B. "Ofa Clean Spezial-Waschmittel"), keine Weichspüler verwender
- gut ausspülen, schonend schleudern aber nicht wringen
- auf einem Handtuch an der Luft oder im Schongang Ihres Trockners trocknen niemals bügeln und nicht auf der Heizung oder in der Sonne trocknen

### Material zusammen setzung

Verwendet werden Polyamid, Elastan und Baumwolle. Die konkreten Angaben entnehmen Sie bitte dem in Ihrem Strumpf eingenähten Textiletikett.

#### Pflegen

- trocken, am besten in Originalverpackung lagern,
- vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen Strümpfe mit silikonbeschichteten Haftbändern nicht mit Lösungsmitteln, Salben, Cremes und rückfettenden Waschlotionen in Berührung bringen, da die Haftfähigkeit dauerhaft beeinträchtigt
- unbedingt auf regelmäßige Fußpflege und einwandfreies Schuhwerk achten
- Faserknötchen (Pilling) sind ein normaler Vorgang bei Textilien und kein Reklamationsgrund
- Schäden an Strümpfen niemals selbst reparieren. sondern zurück zu dem Fachhändler bringen, bei dem der Strumpf gekauft wurde

## Zweckbestimmung

Kompressionsstrümpfe werden zur Therapie von phlebologischen und lymphologischen Erkrankungen der Arme und Beine sowie bei Lipödemen einge setzt. Je nach Indikation kommen unterschiedliche Produkte zum Einsatz.

#### Wirkprinzip medizinischer $Kompressions str\"{u}mpfe$

Durch auf die jeweilige Indikation abgestimmte Produkte und kontrollierten Druck werden der Blutrückfluss beschleunigt, die Mikrozirkulation im Gewebe verbessert und der Lymphfluss gesteigert.

#### ⚠ Wichtige Hinweise

- Kompressionsstrümpfe nur nach Rücksprache mit dem Arzt tragen
- tägliches Tragen und regelmäßige Kontrolluntersuchungen sichern den Behandlungserfolg
- Abgabe und Beratung zum richtigen Anziehen der Strümpfe muss durch medizinisch geschultes Fachpersonal erfolgen
- bei akuten Beinschmerzen oder Hautreaktionen bitte umgehend den Arzt aufsuchen
- regelmäßiges leichtes Versetzen des Haftbands kann Hautirritationen vorbeugen
- bei Qualitätsproblemen und Beanstandungen bitte an den Fachhändler wenden

Rev. 1/04/21

ab.ato.www export@ofa.de 981-7409 129 947-186 777-7403 189 951 Tel. + 49 951

D-96052 Bamberg Laubanger 20 Ofa Bamberg GmbH

# pamberg

Tiür den Fachhändler: Strumpfdaten für Ihre Archivierung

(in Deutschland BfArM) unverzüglich zu melden. Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde getunrt naben oder natten tunren konnen, dem terung des Gesundheitszustandes oder zum Tod Vorfälle, die zu einer wesentlichen Verschlechmit dem Produkt aufgetretene schwerwiegende und Anwender verpflichtet, im Zusammenhang Aufgrund gesetzlicher Vorschriften sind Patienten Meldepflicht

Produkt bitte gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nach Ende der Nutzungsdauer entsorgen Sie das Entsorgung

Produkthaftung des Herstellers. an andere Personen weitergegeben, erlischt die Patienten vorgesehen. Wird es zum Wiedereinsatz ist. Das Produkt ist zur Versorgung eines einzigen nachträgliche Veränderung des Produktes, welche nicht von der Herstellerfirma durchgeführt worden Unter unsachgemäßen Gebrauch fällt auch die unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind. Mängel, welche auf üblichen Verschleiß bzw. ich von der Gewährleistung ausgeschlossen sind der Gewährleistung ausgenommen. Grundsätz-Nach Ablauf dieser Frist sind die Produkte von gemäßer Pflege maximal 6 Monate beträgt. die bei regelmäßigem Gebrauch und ordnungs-3 Jahre begrenzt. Hinzu kommt die Tragezeit, onsstrümpfen ist bei sachgemäßer Lagerung auf Die Lagerfähigkeit von medizinischen Kompressi-Gewährleistung

sinschränkungen. migkeit und Schweißausbrüche, akute Bewegungs-Taubheitsgefühle, zunehmende Schmerzen, Kurzat-Weißfärbung der Zehen, Missempfindungen und Therapie mit dem Arzt besprechen: Blau- oder angehend ausziehen und die Fortführung der Bei folgenden Symptomen, die Strümpfe bitte

commen. Daher wird eine adäquate Hautpflege sionsstrümpfen zu Juckreiz und Hautproblemen Bei empfindlicher Haut kann es unter den Kompres-🕰 Risiken und Nebenwirkungen

#### onen wird jede Haftung abgelehnt. Bei Nichtbefolgung dieser Kontraindikati-

- Chronische Polyarthritis (z. B. Diabetes mellitus) - Fortgeschrittene periphere Neuropathie - Schwere Sensibilitätsstörungen der Extremität Kompressionsstrumptmaterialien - Unverträglichkeiten auf
  - nəsotemaed əbnəssen Relative Kontraindikationen:
  - Phlegmasia coerulea dolens - Septische Phlebitis arterielle Verschlusskrankheit – Dekompensierte Herzinsuffizienz - Fortgeschrittene periphere

Absolute Kontraindikationen: Kontraindikationen

- Narbenbehandlung - Zustand nach Verbrennugen in der Schwangerschaft

- Übelkeit, Schwindel und Stauungsbeschwerden - Entzündliche Dermatosen der Beine Adipositas mit funktioneller venöser Insuffizienz
  - (arthrogenes Stauungssyndrom, Paresen und - Stauungszustände infolge von Immobilitäten II muibet2 de emeboqi1 -
    - Ödeme in der Schwangerschaft
  - гутрьюдете – Thromboseprophylaxe bei mobilen Patienten
    - Postthrombotisches Syndrom - Zustand nach Thrombose
      - Venenthrombose
    - Funktionelle venöse Insuffizienz
      Venöse Malformationen
    - Initiale Phase nach Varikosetherapie
  - Ulcus cruris (siehe Kontraindikationen!) - Therapie des arteriell und venös bedingten
  - Dermatoliposklerose und Atrophie blanche
  - -Prävention und Therapie venöser Haut-
- Prävention und Therapie venöser Ödeme Lebensqualität bei chronischen Venenkrankheiten - Verbesserung venoser Symptome und der

Indikationen (die komplette Liste finden Sie in der Leitlinie AWMF 037/005, Stand 12/18)

# damit Sie gut auf den Beinen bleiben!

Wir geben unser Bestes – und Farbstoffen vorschreibt.

Verwendung von unbedenklichen Materialien erfüllt den Öko-Tex Standard 100, der die kompressionstrümpfe (RAL-GZ 38/\) Prüfungsbestimmungen für medizinische bnu -ətüD nətzenərtz tiəwtləw nəb əziəw Ihre Ofa-Maßanfertigung entspricht beispiels-

tungsvollen Umgang mit unseren Produkten. Prüfinstitute dokumentieren den verantwor-Regelmäßige Zertifizierungen unabhängiger modernster Technik gesichert und kontrolliert. hohe Qualitätsniveau werden durch den Einsatz lung. Die sorgfältige Verarbeitung und das Ergebnis langjähriger Forschung und Entwick-Mit Ihrer Ofa-Maßanfertigung tragen Sie das

ers dem Hause Ofa Bamberg

# Spitzenqualität






Bein, bis er faltenfrei anliegt. me †qmurt2 nəb əi2 nəliətrəv ihn zu überdehnen. Zum Schluss Strumpt gleichmäßig hoch, ohne

٤

Strumpf am Abschluss- oder vermeiden Sie es dabei, den vorsichtig über die Ferse. Bitte 7

Haffrand hochzuziehen.

.nnsq2 n9b Zehen und anschließend über Strumpf bis zum Fuß auf Links. Streifen Sie das Fußteil über die

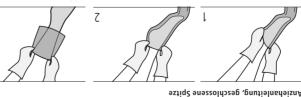


Bein, bis er faltenfrei anliegt. ıyu zn nperdehnen. Zum Schluss Strumpf gleichmäßig hoch, ohne gemaß nach vorne gerollt. -sgnun1o 19b9iw səfqmu1f2 səb


zen heraus. -tiqznədəS əib rədü ənrov dəsn

Strumptes zuruck. səb liət8u1roV nəb əi2 nəqlüts

leicht. znag zəib tzi əflirldəiznA-sfO richtigen Stelle sitzt. Mit der veit an, dass die Ferse an der


dass diese bis kurz über die ,eflindeiznA eib ni oz 8u7 meb Anziehhilfe. Schlüpfen Sie mit -słO netrelieferten Ofaerleichtern Sie sich wesentlich estide nerelener Spitze

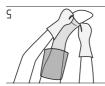

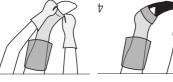





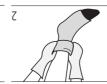



Anziehanleitung, offene Spitze