



← Voor een eenvoudige en moeiteloze nabestelling vindt u aan de linkerkant **uw persoonlijke kousenpaspoort** met daarin alle benodigde informatie. Gewoon lostrekken, op elkaar plakken en goed bewaren.

Met vriendelijke groet,
Ofa Bamberg

↓ Het memoblad voor uw wasmachine:

Compressiekousen
Op de juiste manier wassen

Lastofa Forte niet binnenstebuiten en Lastofa Extra binnenstebuiten wassen en geen wasverzachter gebruiken!

- Fijne was
- Niet bleken
- Voorzichtig drogen
- Niet strijken
- Niet chemisch reinigen

Wassen

- Geschikt voor onmiddellijk gebruik
- Aanbeveling: we raden aan om de kousen te wassen voordat u ze voor de eerste keer draagt
- Dagelijks wassen (max. 40 °C), met de hand of met het machinewasprogramma voor fijne was
- Afzonderlijk wassen met fijnwasmiddel (bijv. "Speciaal wasmiddel Ofa Clean"), geen wasverzachter gebruiken
- Goed uitspoelen, voorzichtig centrifugeren, maar niet uitwringen
- Drogen op een handdoek, op een droogrek of met het droogprogramma voor fijne was van de wasdroger, nooit strijken of op de verwarming of in de zon drogen

Materiaalsamenstelling

Er wordt gebruikgemaakt van polyamide (Polyamid), elastaan (Elastan), katoen (Baumwolle) of merinowol (Merinowolle). Voor specifieke informatie verwijzen wij u naar het textiellabel dat in uw kous is genaaid.

Onderhoud

- Droog en het liefst in de originele verpakking opbergen, beschermen tegen direct zonlicht en warmte
- Zorg ervoor dat kousen met hechtbanden met een siliconenlaag niet in contact komen met oplosmiddelen, zalven, crèmes en hydraterende waslotions, omdat de hechting hierdoor permanent kan worden aangetast
- Verzorg uw voeten regelmatig en zorg ervoor dat u de juiste schoenen draagt
- Vezelpluisjes (pilling) is een normaal verschijnsel bij textiel en geen reden voor reclamatie
- Repareer schade aan de kousen nooit zelf, maar breng ze terug naar de winkel waar u ze hebt gekocht

Beoogd gebruik

Compressiekousen worden gebruikt bij de behandeling van flebologische en lymfologische aandoeningen van de armen en benen en bij lipoedeem. Afhankelijk van de indicatie worden verschillende producten gebruikt.

Werkingsprincipe van medische compressiekousen

Met producten die zijn afgestemd op de betreffende indicatie en gecontroleerde druk, wordt de terugstroom van het bloed versneld, wordt de microcirculatie in het weefsel verbeterd en wordt de lymfestroom verhoogd.

Belangrijke informatie

- Draag alleen compressiekousen na overleg met uw arts
- Dagelijks dragen en regelmatige controles zorgen voor een optimaal effect van de behandeling
- De kousen moeten worden verstrekt door medisch geschoold personeel, dat ook advies geeft over de juiste manier waarop de kousen moeten worden aangetrokken
- Neem bij acute pijn uw in benen of bij huidreacties direct contact op met uw arts
- Door de hechtingsband regelmatig een klein stukje te verplaatsen, kunnen huidirritaties worden voorkomen
- Neem in geval van kwaliteitsproblemen of klachten contact op met de dealer

↓ Voor de dealer: Gegevens van de compressiekousen voor uw archief

www.ofa.de
export@ofa.de
Fax + 49 951 6047-186
Tel. + 49 951 6047-777

ofa bamberg GmbH
Labanger 20
D-96052 Bamberg



Rev. 01-04-2021

Indicaties (zie ook richtlijn medische compressietherapie AWMF 037/005, stand 17/18)

- Verbetring van veneuze symptomen en kwaliteit van leven bij chronische veneuze aandoeningen
- Preventie en behandeling van veneuze oedeem
- Ecxem en pigmentatie
- Dermatoposclerose en atrofie blanche
- Behandeling en pijnvermindering bij ulcus cruris
- venosum, ook recidiefrofylaxie
- Behandeling van artriële en veneuze ulcus cruris (zie contra-indicaties)
- Spataderen
- Eerste fase na behandeling van spataderen
- Functionele veneuze insufficiëntie
- Venuze trombose
- Venuze malformaties
- Lymfoedeem
- Oedeem tijdens de zwangerschap
- Posttraumatisch postoperatief oedeem
- Cyclich-idiopathisch oedeem
- Lipoedeem vanaf stadium II
- Congestie door immobiliteit (afrtoegenen congestiesyndroom, parse en gedeeltelijke parse van de ledematen)
- Wirkgeleerd oedeem (staand, zittend werk)
- Geneesmiddelgeleerd oedeem wanneer geen verandering van medicatie mogelijk is
- Obestas met functionele veneuze insufficiëntie
- Inflammatoire dermatosen van de benen

Wij doen onze uiterste best – om u op de been te houden!

Uw op maat gemaakte product van Ofa voldoet bijvoorbeeld aan de strengste kwaliteits- en productvereisten ter wereld (RAL-GZ 387/1). Ook voldoet het product aan de Ofo-Tex Standard 100, de norm die het gebruik van veilige materialen en kleurstoffen voorschrijft.

Ofa zijn het product van jarenlang onderzoek en hoge kwaliteitsniveau worden gegarandeerd en gecontroleerd door het gebruik van de modernste techniek. Regelmatige certificeringen door onafhankelijke testinstututen documenteren de verantwoorde omgang met onze producten.

Uw op maat gemaakte compressiekousen van Ofa Bamberg

Topkwaliteit

Contra-indicaties

- Behandeling van littekens
- Toestand na brandwonden
- Zwangerschap

Absolute contra-indicaties:

- Gevorderd perifere artriële vaatlijden
- Gedecompenzeerd hartfalen
- Septhische fiebtis
- Rhegmasia coenulea dolens

Relatieve contra-indicaties:

- Vochtige dermatosen
- Onverdraagzaamheid tegen compressiekousmaterialen
- Ernstige sensibilliteitsstoornissen van de ledematen
- Gevorderde perifere neuropathie (bijv. diabetes mellitus)
- Chronische polyartritis

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard als deze contra-indicaties worden genegeerd.

Risico's en bijwerkingen

Bij een gevoelige huid kunnen jeuk en huidproblemen ontstaan onder de compressiekousen. Daarom wordt adequate huidverzorging aanbevolen.


Bij de volgende symptomen dient u de kousen onmiddellijk uit te trekken en de voortzetting van de behandeling met de arts te bespreken: blauwe of witte verkleuring van de tenen, sensibilliteitsstoornissen, een doof gevoel, toemenende pijn, kortademigheid, sterke transpiratie, acute bewegingsbeperkingen.

Verwijdering

Gooi het product aan het einde van de levensduur weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Meldplicht

Op grond van wettelijke voorschriften zijn patiënten en gebruikers verplicht om ernstige incidenten die zich hebben voorgedaan in verband met het product en die tot een aanzienlijke verslechtering van de gezondheidstoestand of tot de dood hebben geleid of hadden kunnen leiden, om middellijk te melden aan de fabrikant en de verantwoordelijke nationale autoriteit (in Duitsland BfArM).

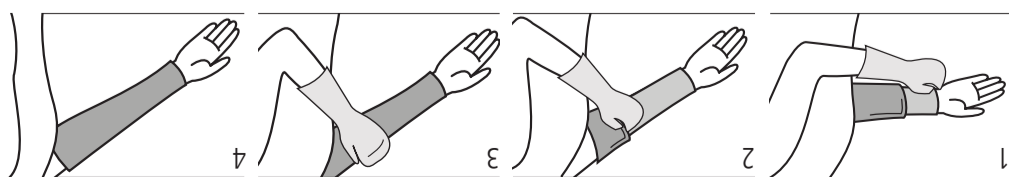

Draai de kous van bovenaf gezien voor de helft binnensstebuiten. Gebruik voor het aantrekken van de kous onze speciale handschoenen Ofa Grip, Trek de armkous nu over uw hand.

Verdeel het resterende gedeelte van de kous gelijkmatig tot aan uw oksel over de arm. Trek de kous niet aan de afwerkrand of hechttrand omhoog om te voorkomen dat deze te ver wordt uitgerekt.

Schuif de kous gelijkmatig over uw arm, totdat hij krekkrvrij aansluit op uw huid.

Het krekkrvrij dragen van kousen is essentieel om afknellen te voorkomen.