

ofa bamberg

Al fine di semplificare al massimo la successiva ordinazione del prodotto nel caso di una nuova prescrizione, può trovare a sinistra il **passaporto personale della Sua calza** contenente tutte le informazioni necessarie. È sufficiente staccarlo, fare aderire insieme le due parti e conservarlo con cura.

Cordiali saluti
Ofa Bamberg

Istruzioni per il lavaggio in lavatrice:



Calze a compressione graduata
Lavaggio corretto

Lavare Lastofa Forte al dritto e Lastofa Extra al rovescio e non utilizzare ammorbidente!



Ciclo di lavaggio delicato



Non candeggiare



Asciugare delicatamente



Non stirare



Non lavare a secco

Lavaggio

- Prodotto adatto per un uso immediato
- Si consiglia di lavarlo prima di indossarlo per la prima volta
- Lavare ogni giorno (max. 40 °C) a mano o in lavatrice con ciclo di lavaggio delicato
- Lavare separatamente con un detersivo delicato (ad es. "detersivo speciale Ofa Clean"), senza ammorbidente
- Risciacquare bene, centrifugare delicatamente ma non strizzare
- Asciugare all'aria su un asciugamano o in asciugatrice con ciclo delicato, non stirare mai le calze e non metterle sul termosifone né esporle al sole

Composizione del materiale

Poliamide (Polyamid), elastan (Elastan) e cotone (Baumwolle) o lana merino (Merinowolle). Per i dettagli specifici consultare l'etichetta in tessuto cucita all'interno della calza.

Cura

- Conservare le calze asciutte, se possibile nella confezione originale, protette dalla luce diretta del sole e dal calore
- Le calze con balza elastica siliconata non devono entrare in contatto con solventi, unguenti, creme per il corpo e lozioni detergenti sebo-restitutive, che potrebbero compromettere permanentemente il potere adesivo delle balze
- Prendersi cura regolarmente dei piedi e assicurarsi che le scarpe siano in perfette condizioni
- I nodini di fibre (pilling) si formano normalmente durante l'uso dei prodotti tessili e non costituiscono motivo di reclamo
- Non tenti mai di riparare eventuali danni, ma restituisca le calze al rivenditore presso cui sono state acquistate

Destinazione d'uso

Le calze a compressione graduata sono utilizzate nel trattamento delle malattie flebologiche e linfologiche delle braccia e delle gambe, nonché del lipedema. A seconda dell'indicazione vengono utilizzati prodotti diversi.

Principio di funzionamento delle calze a compressione graduata per uso medico

Grazie a prodotti realizzati per la rispettiva indicazione e alla pressione controllata si accelera il ritorno del sangue, si migliora la microcircolazione nei tessuti e aumenta il flusso linfatico.

Note importanti

- Indossare le calze a compressione graduata solo dopo aver consultato il medico
- Attraverso l'uso quotidiano e controlli medici regolari il successo del Suo trattamento sarà garantito
- Le calze devono essere fornite da personale specializzato in campo medico, che la consiglierà anche su come indossarle correttamente
- In caso di dolori acuti alle gambe o irritazioni cutanee, consulti immediatamente il medico
- Le reazioni cutanee possono essere evitate spostando leggermente la balza elastica più volte nel corso della giornata
- In caso di problemi riguardanti la qualità e reclami contatti il Suo rivenditore

Rev. 1/04/21

ofa bamberg

Ofa Bamberg GmbH
Lubanger 20
D-96052 Bamberg
Tel. + 49 951 6047-777
Fax + 49 951 6047-186
export@ofa.de
www.ofa.de

Per il rivenditore: dati delle calze da conservare

Indicazioni (vedere anche le linee guida per la terapia compressiva medica AWMF 037/005, vers. 12/18)

- Miglioramento dei sintomi venosi e della qualità della vita nelle malattie venose croniche
- Prevenzione e terapia dell'edema venoso
- Prevenzione e terapia delle alterazioni cutanee venose
- Eczema e pigmentazione venosa
- Dermatopiodermatosi e artrofa bianca
- Terapia e riduzione del dolore per le ulcere venose del piede, anche per la profilassi delle recidive
- Profilassi della trombosi per pazienti deambulanti
- Sindrome post-trombotica
- Profalassi della trombosi per pazienti deambulanti
- Linfedema
- Edema durante la gravidanza
- Edema post-traumatico/postoperatorio
- Edema idiopatico ciclico
- Lipedema a partire dalla fase II
- Congestione dovuta all'immobilità (sindrome da congestione atrofica, paresi e paresi parziali dell'arto)
- Edema occupazionale (occupazioni che richiedono lo stare in piedi, seduti)

Controindicazioni assolute:

- Insufficienza cardiaca scompensata
- Insufficienza arteriosa periferica avanzata
- Malattia occlusiva arteriosa periferica avanzata
- Fiebite settica
- Flebite settica
- Flegmasia cerulea dolens

Controindicazioni relative:

- Dermatosi essudante
- Incompatibilità con i materiali delle calze a compressione
- Gravi disturbi della sensibilità dell'arto
- Neuropatia periferica avanzata (ad esempio diabete mellito)
- Poliartrite cronica

Si declina ogni responsabilità se queste controindicazioni non vengono rispettate.

Rischi ed effetti collaterali

In caso di pelle sensibile, le calze a compressione graduata possono causare prurito e problemi cutanei. Quindi si raccomanda un'adeguata cura della pelle.

In caso dei seguenti sintomi, rimuova immediatamente le calze e discuta con il Suo medico il proseguimento della terapia: Colorazione blu o bianca delle dita

La qualità superiore di Ofa Bamberg

Il prodotto su misura Ofa che Lei indossa è il risultato di molti anni di ricerca e sviluppo. L'accurata lavorazione e l'alto livello di qualità sono garantiti e controllati mediante l'impiego della tecnologia più moderna. Il rilascio regolare di certificazioni da parte di enti di controllo indipendenti documenta la gestione responsabile dei nostri prodotti.

Il Suo prodotto su misura Ofa rispetta, ad esempio, i requisiti più severi al mondo in materia di qualità e controlli delle calze a compressione graduata per uso medico (RAL-GZ 387/1) e soddisfa l'Öko-Tex Standard 100, che prescrive l'uso di materiali e coloranti innocui per la salute.

Noi facciamo del nostro meglio – per il benessere delle Sue gambe!

Edema indotto da farmaci, se non è possibile una modifica della terapia

Adiposità con insufficienza venosa funzionale

Dermatosi infiammatorie delle gambe

Nausea, vertigine e fastidi da congestione durante la gravidanza

Conditone post-ustione

Trattamento delle cicatrici

Conditone post-ustione

Conditone post-ustione

Conditone post-ustione

Conditone post-ustione

La durata di conservazione delle calze a compressione per uso medico è limitata a 3 anni, se conservate correttamente. A ciò si aggiunge il tempo di utilizzo delle calze che, se indossate regolarmente e trattate con cura, è al massimo di 6 mesi. Dopo questo periodo, i prodotti sono esclusi dalla garanzia. Sono sostanzialmente esclusi dalla garanzia i difetti dovuti alla normale usura o all'uso improprio. L'uso improprio comprende anche eventuali successive modifiche del prodotto che non siano state effettuate dal produttore.

Il prodotto è destinato a un singolo paziente. Se viene trasmessa ad altre persone per il riutilizzo, la responsabilità del produttore decade.

Al termine della sua vita utile, smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.


Obbligo di notifica

A causa delle norme di legge, i pazienti e gli utenti sono tenuti a segnalare immediatamente al produttore e all'autorità nazionale competente (in Germania BfArM) qualsiasi incidente grave in relazione al prodotto e che abbia portato o possa aver portato a un significativo deterioramento dello stato di salute o alla morte.


Smaltimento

Al termine della sua vita utile, smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.

ofa bamberg

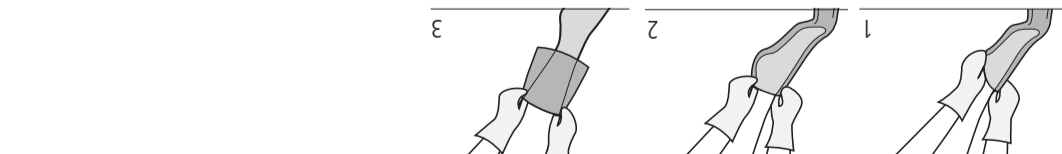

Istruzioni per indossare le calze, punta aperta

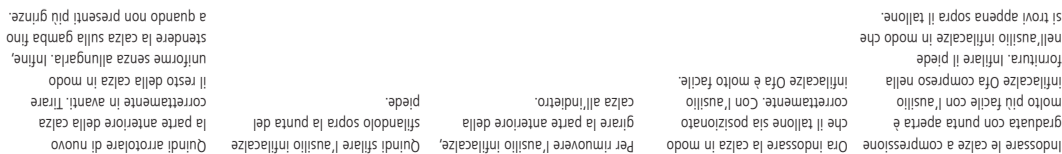

Istruzioni per indossare le calze, punta chiusa

Indossare le calze a compressione graduata con punta aperta è molto più facile con l'ausilio delle calze Ofa compressive nella forma di apertura. Infilare il piede nel tallone e tirare la calza fino al collo del piede. Far scivolare la parte superiore della calza sopra il tallone. Evitare di tirare la calza stendendo la calza sulla gamba fino a quando non presenti più grinze.

Per rimuovere l'ausilio infilante, girare la parte anteriore della calza all'indietro. Quindi sfilare l'ausilio infilante sfilandolo sopra la punta del piede. Quindi arrotolare di nuovo la calza sulla gamba fino a quando non presenti più grinze.