

For at gøre det helt enkelt og ukompliceret at genbestille din næste recept kan du i venstre side finde **dit personlige strømpepas** med alle relevante oplysninger. Træk det af, klæb det sammen, og opbevar det, så du kan bruge det igen.

Med de bedste anbefalinger
Ofa Bamberg

Husk sedlen til din vaskemaskine:



Kompressionsstrømper

Sådan vasker du korrekt

Vask Lastofa Forte med vrangen indad og vask Lastofa Extra med vrangen udad, og undlad at bruge skyllemiddel!

- Skånevask
- Må ikke bleges
- Tørres på skåneprogram
- Må ikke stryges
- Tåler ikke kemisk rensning

Vask

- Strømperne kan tages i brug med det samme.
- Vi anbefaler at vaske dem, før de tages på første gang.
- Vask dem derefter i hånden eller på skånevask i vaskemaskinen.
- Vask strømperne separat med et mildt vaskemiddel uden skyllemiddel (f.eks. Ofa Clean specialvaskemiddel) ved maksimalt 40 °C og skyl dem grundigt.
- Strømperne kan centrifugeres forsigtigt, men må ikke vrides.
- Lad dine kompressionsstrømper lufttørre på et håndklæde, eller tør dem på skåneprogram i tørretumbleren, men læg dem ikke på radiatoren eller i direkte sol. Strømperne må ikke stryges.

Materialesammensætning

Der er anvendt polyamid (Polyamid), elastan (Elastan) og bomuld (Baumwolle) eller merinould (Merinowolle). Se de konkrete specifikationer på den tekstilmærkat, der er syet på strømperne.

Pleje

- Strømperne bør opbevares tørt og beskyttet mod sol og varme, om muligt i originalemballagen.
- Strømper med selvsiddende, silikonebelagte kanter bør generelt ikke komme i kontakt med opløsningsmidler, salver, fugtgivende vaske lotioner eller kropscrème.
- Kanternes klæbeevne kan ellers svækkes permanent.
- Regelmæssig fodpleje og optimalt fodtøj er strengt nødvendigt
- Fibernuder, der kan opstå som følge af friktion mod andre beklædningsgenstande, forringer ikke strømperens kvalitet.
- Forsøg ikke selv at reparere skader, men tag strømperne med tilbage til den specialforhandler, hvor du købte den.

Anvendelsesformål

Kompressionsstrømper anvendes til terapeutisk behandling af flebologiske og lymfologiske sygdomme i arme og ben såvel som ved lipodemer. Afhængigt af indikation vil forskellige produkter tages i brug.

Sådan virker medicinske kompressionsstrømper

Ved hjælp af produkter, der er afstemt med den specifikke indikation, og ved hjælp af kontrolleret tryk bliver blodets tilbagestrømning accelereret, mikrocirkulationen i bindevæv forbedres, og lymfestrømmen stiger.

Vigtige anvisninger

- Brug kun kompressionsstrømper efter aftale med din læge.
- Ved daglig brug og regelmæssig kontrol hos lægen sikrer du dig, at behandlingen bliver vellykket!
- Udlevering af strømperne skal ske gennem medicinsk uddannet fagpersonale. Din specialforhandler vil også rådgive dig om, hvordan du tager strømperne rigtigt på.
- Skulle der opstå akutte smerter i benet eller hudirritationer, mens du har strømperne på, skal du straks tage kontakt til egen læge.
- Hudreaktioner i områder, hvor de selvsiddende kanter sidder, kan forebygges ved, at kanten i løbet af en dag flere gange flyttes lidt.
- I tilfælde af kvalitetsproblemer og mangler bedes du kontakte forhandleren.

www.ofa.de
export@ofa.de
Fax + 49 951 6047-186
Tel. + 49 951 6047-777
D-96052 Bamberg
Labanger 20

Ofa Bamberg GmbH

Vi gør vores bedste – så du kan passe på dig selv!

Dit specialfremstillede Ofa-kompressionsprodukt er f.eks. i overensstemmelse med verdens strengeste kvalitets- og testbestemmelser for medicinske kompressionsstrømper (RAL-GZ 387/1) og opfylder Ofo-Test Standard 100, som foreskriver brug af sikre materialer og farvestoffer.

Dit specialfremstillede Ofa-kompressionsprodukt er resultatet af mange års forskning og udvikling. Den omhyggelige behandling og det høje kvalitetsniveau sikres og kontrolleres ved hjælp af den nyeste teknologi. Regelmæssige certificeringer fra uafhængige testinstitutter dokumenterer den ansvarlige håndtering af vores produkter.

Topkvalitet fra Ofa Bamberg

Indikatorer (se også retningslinjerne for medicinsk kompressionsterapi fra AWMF 037/005, stand 12/18)

- Forbedring af venøse symptomer og livskvalitet ved kroniske venebløder
- Forebyggelse af og terapi ved venøse ødemer
- Forebyggelse af og terapi ved venøse forandringer i huden
- Eksem og pigmentering
- Dermatitis og pigmentering ved Ulcus cruris
- Terapi og smertereducering ved Ulcus cruris
- Venosum, også til forebyggelse af tilbagefald
- Terapi ved artfæl og venøs betinget Ulcus cruris (se kontraindikationer)
- Arknuder
- Initial fase efter varikoseterapi
- Funktionel venøs insufficiens
- Venøse malformationer
- Venetrombose
- Tilstand efter trombose
- Posttraumatisk/posoperative ødemer
- Lymfeknuder
- Ødemer i graviditeten
- Posttraumatisk/posoperative ødemer
- Overbelastningsstilstande som følge af ubevægelighed (arthrogen overbelastningsyndrom, pareser og depareser i ekstremiteter)
- Erhvervsbetingede ødemer (stillesiddende arbejde, stående arbejde)
- Medicinøst betingede ødemer, hvis en stillingsforandring ikke er mulig
- Adipositas med funktional venøs insufficiens

Kontraindikationer

- Inflammatoriske dermatoser i benene
- Kvalme, svimmelhed og problemer med overbe-stede blodårer i graviditeten
- Tilstand efter brandsår
- Behandling af ar

Absolute kontraindikationer:

- Frenskredens perifer arteriel okklusiv sygdom
- Frenskredens perifer arteriel okklusiv sygdom
- Septisk flebitis
- Dekompenseret hjertefunktionsinsufficiens
- Relativ kontraindikationer:
- Phlegmasia coerulea dolens
- Løbende dermatoser
- Intolerance i forhold til materialerne i kompres-sionstørmperne
- Svære sensibilitetsforstyrrelser i ekstremiteten (f.eks. diabetes
- Frenskredens perifer neuropati (f.eks. diabetes
- Kronisk polyarthritis

Ved manglende overholdelse af disse kontraindikationer træffer vi os ethvert ansvar.

Relativ og bivirkninger

- Ved følsom hud kan der under kompressionssømperne opstå kløe og hudproblemer. Derfor kan en tilstrækkelig hudpleje i høj grad anbefales.
- Ved følgende symptomer bør du omgående tage strømperne af og rådføre dig med din læge angående fortsættelse af behandlingen
- Akutte indskrænkninger i bevægeligheden, svædelse, rødme, kløe eller hvide, udslæt
- Akutte indskrænkninger i bevægeligheden, svædelse, rødme, kløe eller hvide, udslæt

Ammeldespligt

På grund af love og regler er patienter og brugere af kompressionsstrømper forpligtet til at rapportere til deres læge eller har ført til eller kunne have ført til dennes død, alvorlig forringelse i helbredsstatus hos patienten


Bortskaffelse

Efter brug bør produktet bortskaffes i overensstem-melse med de lokale regler for affaldssortering.

Garanti

Opbevaringsvejen for medicinske kompressionsstrømper er ved passende opbevaring begrænset til 3 år. Hertil kommer bærertiden, der ved regelmæssig brug og korrekt pleje maksimalt er 6 måneder. Efter udløbet af garantien, som udgangspunkt er man-områttet af garantien. Under

Vejledning til at tage strømper på, lukket spids

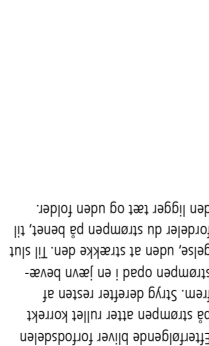

1. Træk den ene fod ind i strømpeåbningen, så foden er helt i. Sæt den anden fod ind i strømpeåbningen. Sæt strømperne på begge fødder. Træk strømperne ned på benene. Strømperne skal nu sidde på benene. Hvis strømperne er for små, kan du strække dem. Hvis de er for store, kan du strække dem. Hvis de er for små, kan du strække dem. Hvis de er for store, kan du strække dem.

Vejledning til at tage strømper på, åben spids



1. Træk den ene fod ind i strømpeåbningen, så foden er helt i. Sæt den anden fod ind i strømpeåbningen. Sæt strømperne på begge fødder. Træk strømperne ned på benene. Strømperne skal nu sidde på benene. Hvis strømperne er for små, kan du strække dem. Hvis de er for store, kan du strække dem. Hvis de er for små, kan du strække dem. Hvis de er for store, kan du strække dem.