

Passaporto della calza

Passaporto della calza

Ecco il Suo prodotto su misura!

→ Istruzioni per il lavaggio in lavatrice:



Calze a compressione graduata Lavaggio corretto

Lavare Lastofa Forte al dritto e
Lastofa Extra al rovescio e non
utilizzare ammorbidente!

- Ciclo di lavaggio delicato
- ✗ Non candeggiare
- ✗ Asciugare delicatamente
- ✗ Non stirare
- ✗ Non lavare a secco

Lavaggio

- Prodotto adatto per un uso immediato
- Si consiglia di lavarlo prima di indossarlo per la prima volta
- Lavare ogni giorno (max. 40 °C) a mano o in lavatrice con ciclo di lavaggio delicato
- Lavare separatamente con un detergente delicato (ad es. "detergente speciale Ofa Clean"), senza ammorbidente
- Risciacquare bene, centrifugare delicatamente ma non stirare
- Asciugare all'aria su un asciugamano o in asciugatrice con ciclo delicato, non stirare mai le calze e non metterle sul termostrone né esporle al sole

Composizione del materiale

Poliammide (Polyamid), elastan (Elastan) e cotone (Baumwolle) o lana merino (Merinowolle). Per i dettagli specifici consultare l'etichetta in tessuto cucita all'interno della calza.

Cura

- ← Al fine di semplificare al massimo la successiva ordinazione del prodotto nel caso di una nuova prescrizione, può trovare a sinistra il **passaporto personale della Sua calza** contenente tutte le informazioni necessarie. È sufficiente staccarlo, fareaderire insieme le due parti e conservarlo con cura.

Cordiali saluti
Ofa Bamberg

Principio di funzionamento delle calze a compressione graduata per uso medico

Grazie a prodotti realizzati per la rispettiva indicazione e alla pressione controllata si accelera il ritorno del sangue, si migliora la microcircolazione nei tessuti e aumenta il flusso linfatico.

△ Note importanti

- Indossare le calze a compressione graduata solo dopo aver consultato il medico
- Attraverso l'uso quotidiano e controlli medici regolari il successo del Suo trattamento sarà garantito
- Le calze devono essere fornite da personale specializzato in campo medico, che la consiglierà anche su come indossole correttamente
- In caso di dolori acuti alle gambe o irritazioni cutanee, consulti immediatamente il medico
- Le reazioni cutanee possono essere evitate spostando leggermente la balza elastica più volte nel corso della giornata
- In caso di problemi riguardanti la qualità e reclami contatti il Suo rivenditore

Rev. 1/04/21


www.ofa.de
export@ofa.de
Fax +49 951 6047-186
Tel. +49 951 6047-777
D-96052 Bamberg
Laubanweg 20
Ofa Bamberg GmbH

→ Per il rivenditore: dati delle calze da conservare

Noi faciamo del nostro meglio –

Indicazioni (vedere anche le linee guida per la terapia complessiva medica AWMF 037/005, vers. 12/18)	– Individuare le indossose della calza per la terapia	– Eseguire la compressione	– Istruire il paziente sulla compressione	– Trattamento delle varici	– Fase iniziale dopo la terapia delle varici	– Drenaggio venoso	– Malattia coclitica cronica avanza-	– Edema post-traumatico/postoperatorio	– Edema idiopatico/ciclico	– Lipedema a partire dalla fase II	– Edema idiopatico cronico	– Cognestione post-trautica/osteoartrite	– Gravi distrosi della balza	– Neurite post-trombole	– Sindrome post-trombole	– Profissionali troppo per pazienti debilitati	– Conservare le calze asciutte, se possibile nella confezione originale, protette dalla luce diretta del sole e dal calore	– Le calze con balza elastica siliconata non devono entrare in contatto con solventi, unguenti, creme per il corpo e lozioni detergenti sebo-restitutive, che potrebbero compromettere permanentemente il potere adesivo della balza	– Prendersi cura regolarmente dei piedi e assicurarsi che le scarpe siano in perfette condizioni	– Non tenti mai di riparare eventuali danni, ma restituisci le calze al rivenditore presso cui sono state acquistate		
Garanzia	– Modificare le terapie	– Trattamenti delle varici	– Conservare le calze asciutte, se possibile nella confezione originale, protette dalla luce diretta del sole e dal calore	– Neurite post-trombole	– Trattamento delle varici croniche	– Drenaggio venoso	– Malattia coclitica cronica avanza-	– Profissionali troppo per pazienti debilitati	– Conservare le calze asciutte, se possibile nella confezione originale, protette dalla luce diretta del sole e dal calore	– Neurite post-trombole	– Trattamento delle varici croniche	– Drenaggio venoso	– Malattia coclitica cronica avanza-	– Profissionali troppo per pazienti debilitati	– Conservare le calze asciutte, se possibile nella confezione originale, protette dalla luce diretta del sole e dal calore	– Neurite post-trombole	– Sindrome post-trombole	– Profissionali troppo per pazienti debilitati	– Conservare le calze asciutte, se possibile nella confezione originale, protette dalla luce diretta del sole e dal calore	– Neurite post-trombole	– Sindrome post-trombole	– Profissionali troppo per pazienti debilitati
Ogni calza	– La durata di conservazione delle calze a compressione	– Per evitare la gengivite e il tempo di utilizzo delle calze deve essere adeguato al problema da trattare	– Per i contatti frequenti tra la pelle e la calza non è necessario che la calza sia sempre indossata	– Istruire il paziente sulla compressione	– Modificare le terapie	– Trattamenti delle varici	– Malattia coclitica cronica avanza-	– Profissionali troppo per pazienti debilitati	– Conservare le calze asciutte, se possibile nella confezione originale, protette dalla luce diretta del sole e dal calore	– Neurite post-trombole	– Trattamento delle varici croniche	– Drenaggio venoso	– Malattia coclitica cronica avanza-	– Profissionali troppo per pazienti debilitati	– Conservare le calze asciutte, se possibile nella confezione originale, protette dalla luce diretta del sole e dal calore	– Neurite post-trombole	– Sindrome post-trombole	– Profissionali troppo per pazienti debilitati	– Conservare le calze asciutte, se possibile nella confezione originale, protette dalla luce diretta del sole e dal calore	– Neurite post-trombole	– Sindrome post-trombole	– Profissionali troppo per pazienti debilitati
Ogni indossose	– Aumento del dolore, disperse alcune attacchi di sudoripidamento, dei piedi, sensazioni di disidratosi e intorpidimento.	– La durata di conservazione delle calze a compressione	– Per i contatti frequenti tra la pelle e la calza non è necessario che la calza sia sempre indossata	– Istruire il paziente sulla compressione	– Modificare le terapie	– Trattamenti delle varici	– Malattia coclitica cronica avanza-	– Profissionali troppo per pazienti debilitati	– Conservare le calze asciutte, se possibile nella confezione originale, protette dalla luce diretta del sole e dal calore	– Neurite post-trombole	– Trattamento delle varici croniche	– Drenaggio venoso	– Malattia coclitica cronica avanza-	– Profissionali troppo per pazienti debilitati	– Conservare le calze asciutte, se possibile nella confezione originale, protette dalla luce diretta del sole e dal calore	– Neurite post-trombole	– Sindrome post-trombole	– Profissionali troppo per pazienti debilitati	– Conservare le calze asciutte, se possibile nella confezione originale, protette dalla luce diretta del sole e dal calore	– Neurite post-trombole	– Sindrome post-trombole	– Profissionali troppo per pazienti debilitati

ofa bamberg

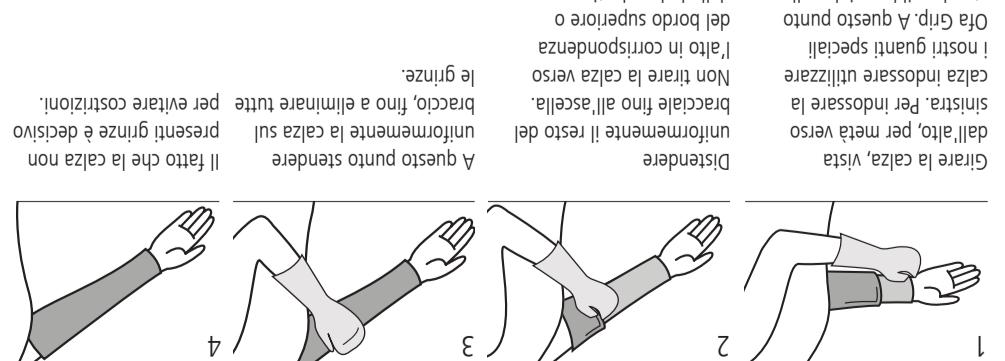

→ Istruzioni per indossare i braccioli