

ofa bamberg

Al fine di semplificare al massimo la successiva ordinazione del prodotto nel caso di una nuova prescrizione, può trovare a sinistra **il passaporto personale della Sua calza** contenente tutte le informazioni necessarie. È sufficiente staccarlo, fare aderire insieme le due parti e conservarlo con cura.

Cordiali saluti
Ofa Bamberg

Istruzioni per il lavaggio in lavatrice:



Calze a compressione graduata
Lavaggio corretto

Lavare Lastofa Forte al dritto e Lastofa Extra al rovescio e non utilizzare ammorbidente!



Ciclo di lavaggio delicato



Non candeggiare



Asciugare delicatamente



Non stirare



Non lavare a secco

Lavaggio

- Prodotto adatto per un uso immediato
- Si consiglia di lavarlo prima di indossarlo per la prima volta
- Lavare ogni giorno (max. 40 °C) a mano o in lavatrice con ciclo di lavaggio delicato
- Lavare separatamente con un detersivo delicato (ad es. "detersivo speciale Ofa Clean"), senza ammorbidente
- Risciacquare bene, centrifugare delicatamente ma non strizzare
- Asciugare all'aria su un asciugamano o in asciugatrice con ciclo delicato, non stirare mai le calze e non metterle sul termosifone né esporle al sole

Composizione del materiale

Poliamide (Polyamid), elastan (Elastan) e cotone (Baumwolle) o lana merino (Merinowolle). Per i dettagli specifici consultare l'etichetta in tessuto cucita all'interno della calza.

Cura

- Conservare le calze asciutte, se possibile nella confezione originale, protette dalla luce diretta del sole e dal calore
- Le calze con balza elastica siliconata non devono entrare in contatto con solventi, unguenti, creme per il corpo e lozioni detergenti sebo-restitutive, che potrebbero compromettere permanentemente il potere adesivo delle balze
- Prendersi cura regolarmente dei piedi e assicurarsi che le scarpe siano in perfette condizioni
- I nodini di fibre (pilling) si formano normalmente durante l'uso dei prodotti tessili e non costituiscono motivo di reclamo
- Non tenti mai di riparare eventuali danni, ma restituisca le calze al rivenditore presso cui sono state acquistate

Destinazione d'uso

Le calze a compressione graduata sono utilizzate nel trattamento delle malattie flebologiche e linfologiche delle braccia e delle gambe, nonché del lipedema. A seconda dell'indicazione vengono utilizzati prodotti diversi.

Principio di funzionamento delle calze a compressione graduata per uso medico

Grazie a prodotti realizzati per la rispettiva indicazione e alla pressione controllata si accelera il ritorno del sangue, si migliora la microcircolazione nei tessuti e aumenta il flusso linfatico.

Note importanti

- Indossare le calze a compressione graduata solo dopo aver consultato il medico
- Attraverso l'uso quotidiano e controlli medici regolari il successo del Suo trattamento sarà garantito
- Le calze devono essere fornite da personale specializzato in campo medico, che la consiglierà anche su come indossarle correttamente
- In caso di dolori acuti alle gambe o irritazioni cutanee, consulti immediatamente il medico
- Le reazioni cutanee possono essere evitate spostando leggermente la balza elastica più volte nel corso della giornata
- In caso di problemi riguardanti la qualità e reclami contatti il Suo rivenditore

Per il rivenditore: dati delle calze da conservare

www.ofa.de
export@ofa.de
Tel. + 49 951 6047-186
Fax + 49 951 6047-777

D-96052 Bamberg
Labanger 20
Ofa Bamberg GmbH

ofa bamberg

Rev. 1/04/21

Indicazioni (vedere anche le linee guida per la terapia compressiva medica AWMF 037/005, vers. 12/18)

– Miglioramento dei sintomi venosi e della qualità della vita nelle malattie venose croniche

– Prevenzione e terapia dell'edema venoso

– Prevenzione e terapia delle alterazioni cutanee

– Eczema e pigmentazione venosa

– Terapia e riduzione del dolore per le ulcere venose

– Terapia delle ulcere del piede correlate ad arterie e vene (vedere controindicazioni!)

– Varici

– Fase iniziale dopo la terapia delle vene

– Insufficienza venosa funzionale

– Edema durante la gravidanza

– Edema post-traumatico/postoperatorio

– Edema idiopatico ciclico

– Lipedema a partire dalla fase II

– Congestione dovuta all'immobilità (sindrome da congestione atrofica, paresi e paresi parziale dell'arto)

– Edema occupazionale (occupazioni che richiedono lo stare in piedi, seduti)

Controindicazioni assolute:

– Malattia occlusiva arteriosa periferica avanzata

– Insufficienza cardiaca scompensata

– Flebite settica

– Flegmastia cerulea dolens

Controindicazioni relative:

– Dermatosi essudante

– Incompatibilità con i materiali delle calze a compressione

– Gravi disturbi della sensibilità dell'arto

– Neuropatia periferica avanzata (ad esempio diabete mellito)

– Poliartrite cronica

Si declina ogni responsabilità se queste controindicazioni non vengono rispettate.

Rischi ed effetti collaterali

– In caso di pelle sensibile, le calze a compressione graduata possono causare prurito e problemi cutanei. Quindi si raccomanda un'adeguata cura della pelle.

– In caso dei seguenti sintomi, rimuova immediatamente le calze e discuta con il Suo medico il proseguimento della terapia: Colorazione blu o bianca delle dita

Garanzia

La durata di conservazione delle calze a compressione per uso medico è limitata a 3 anni, se conservate correttamente. A ciò si aggiunge il tempo di utilizzo delle calze che, se indossate regolarmente e trattate con cura, è al massimo di 6 mesi. Dopo questo periodo, i prodotti sono esclusi dalla garanzia. Sono sostanzialmente esclusi dalla garanzia i difetti dovuti alla normale usura o all'uso improprio. L'uso improprio comprende anche eventuali successive modifiche del prodotto che non siano state effettuate dal produttore. Il prodotto è destinato a un singolo paziente. Se viene trasmessa ad altre persone per il riutilizzo, la responsabilità del produttore decade.

Smaltimento

Al termine della sua vita utile, smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.

Obbligo di notifica


sono tenuti a segnalare immediatamente al produttore e all'autorità nazionale competente (in Germania BfArM) qualsiasi incidente grave in relazione al prodotto e che abbia portato o possa aver portato a un significativo deterioramento dello stato di salute o alla morte.

La qualità superiore di Ofa Bamberg il prodotto su misura Ofa che Lei indossa è il risultato di molti anni di ricerca e sviluppo. L'accurata lavorazione e i controlli mediante l'impiego della tecnologia più moderna, il rilascio regolare di centrifuganti documenta la gestione responsabile dei nostri prodotti.

Il Suo prodotto su misura Ofa rispetta, ad esempio, i requisiti più severi al mondo in materia di qualità e controlli delle calze a compressione graduata per uso medico (RAL-GZ 387/1) e soddisfa l'Öko-Tex Standard 100, che prescrive l'uso di materiali e coloranti innocui per la salute.

Noi facciamo del nostro meglio – per il benessere delle Sue gambe!

ofa bamberg

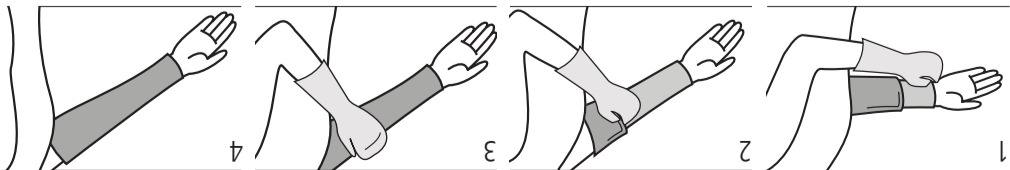

Istruzioni per indossare i bracciali