

ofa bamberg

Norādījumi mazgāšanai veļas mašīnā



Kompresijas zeķes

Pareiza mazgāšana

Mazgājiet „Lastofa Forte” ar labo pusi uz āru, bet „Lastofa Extra” – ar kreiso pusi uz āru, neizmantojot veļas mikstinātāju!

- Sausdzējošs mazgāšanas režīms
- Nebalīniet
- Žāvējiet sauszīgi
- Neļūdiniet
- Netīriet ķīmiski

Mazgāšana:

- paredzētas tūlītējai izmantošanai;
- pirms pirmreizējās uzvilšanas ieteicams izmazgāt;
- ikdienas mazgāšana (maks. 40 °C temperatūrā), ar rokām vai veļas mašīnā, saudzējošā mazgāšanas režīmā;
- atsevišķi, izmantojot mazgāšanas līdzekli smalkveļai (piemēram, „Ofa Clean” speciālo mazgāšanas līdzekli), bez veļas mikstinātāja;
- rūpīgi izskalojiet, žāvējiet centrifūgas saudzējošajā režīmā, bet neizgrieziet;
- žāvējiet, izlielot uz dvieļa vai izmantojot žāvētāja saudzīgo ciklu, taču nekad neļūdiniet un nenovietojiet zeķes uz sildķermeņiem vai tiešos saules staros.

Materiāla sastāvs

Izmantots poliamids (Polyamid), elastāns (Elastan) un kokvilna (Baumwolle) vai merīnvilna (Merinowolle).
Lai iegūtu konkrētu informāciju, lūdzu, skatiet auduma etiķeti, kas piestiprināta jūsu zeķei.

Kopšana:

- uzglabājiet zeķes sausā vietā, kas aizsargāta no tiešas saules un karstuma iedarbības, vēlams oriģinālajā iepakojumā;
- zeķes, kurām ir ar silikonu pārklātas saturošās joslas, nedrīkst nonākt saskarē ar šķīdinātājiem, ziedēm, krēmiem un mitrinošiem mazgāšanas līdzekļiem – pretējā gadījumā saturošās joslas funkcija tiks neatgriezeniski sabojāta;
- noteikti pievērsiet uzmanību regulārai pēdu kopšanai un nevainojamai apavu kvalitātei;
- šķīdru mezgliņi tekstilizstrādājumiem ir normāla parādība un nav iemesls reklamācijai;
- nelaboiet zeķu bojājumus patstāvīgi, bet gan atdodiet zeķi specializētās tirdzniecības pārstāvim, pie kura to iegādājāties.

Paredzētais mērķis

Kompresijas zeķes izmanto, lai ārstētu flebologiskas un limfologiskas roku un kāju slimības, kā arī lipēdēmu. Atkarībā no indikācijām tiek izmantoti dažādi izstrādājumi.

Medicīnisko kompresijas zeķu iedarbības princips

Ar attiecīgajai indikācijai pielāgotiem izstrādājumiem un kontrolētu spiedienu tiek paātrināta asins atplūšana, uzlabota mikrocirkulācija audos un palielināta limfas plūsma.

▲ Svarīgas norādes:

- valkājiet kompresijas zeķes tikai pēc konsultēšanās ar ārstu;
- nodrošiniet veiksmīgu ārstēšanu, nēsājot izstrādājumu katru dienu un veicot regulāras medicīniskās pārbaudes;
- zeķu izsniegšanu un konsultācijas par pareizu to valkāšanu drīkst sniegt tikai medicīniski apmācīts personāls;
- ja novērojāt akūtas sāpes kājās vai ādas reakcijas, nekavējoties vērsieties pie ārsta;
- jūs varat novērst ādas kairinājumu, regulāri nedaudz izmainot saturošās joslas pozīciju;
- ja rodas ar kvalitāti saistītas problēmas vai sūdzības, vērsieties pie specializētās tirdzniecības pārstāvja.

Vers. 1.04.21

ofa bamberg

Ofa Bamberg GmbH

Laubanger 20
D-96052 Bamberg
Tel. + 49 951 6047-777
Fax + 49 951 6047-186
export@ofa.de
www.ofa.de

↓ Specializētās tirdzniecības pārstāvis: informācija par zeķi arhivēšanas nolūkiem.

▼ **Riski un blaknes**
Jūgtas ādas gadījumā zem kompresijas zeķēm var rasties nieze un ādas problēmas. Tādēļ ieteicama atbilstoša ādas kopšana.

▼ **50 kontrindikāciju neievērošana padara par neesošu jebkuru atbilstības pienākumu.**

▼ **Ārta konsultācija**
Ja rodas tālāk norādītie simptomi, lūdzu, vērsieties pie ārsta.

▼ **Ārta konsultācija**
Ja rodas tālāk norādītie simptomi, lūdzu, vērsieties pie ārsta.

▼ **Ārta konsultācija**
Ja rodas tālāk norādītie simptomi, lūdzu, vērsieties pie ārsta.

▼ **Ārta konsultācija**
Ja rodas tālāk norādītie simptomi, lūdzu, vērsieties pie ārsta.

▼ **Ārta konsultācija**
Ja rodas tālāk norādītie simptomi, lūdzu, vērsieties pie ārsta.

▼ **Indikācijas (skatiet arī Medicīniskās kompresijas terapijas vadlīniju AMM 037/005, 2018. gada decembra redakcija)**

- Venozu simptomu un dzīves kvalitātes uzlabošana hronisku venozu slimību gadījumā
- Venozu tūsku profilakse un ārstēšana
- Venozu tūsku izmaiņu profilakse un ārstēšana
- Ažektu un pūslīšu ārstēšana
- Ādas liposkleroze un ātrās bīšanas
- Uzveic ādas profilaksi un ārstēšanu
- Mazināšana, arī recidīvu profilakse
- Arteritāšu un venozās tūskas ārstēšana
- Ārta konsultācija
- Venozu tūsku profilakse un ārstēšana
- Sākotnējā fāzē pēc varikozes ārstēšanas
- Venozas malformācijas
- Venozas trombozes
- Stāvokļa profilakse un ārstēšana
- Trombozes profilakse pacientiem, kas pavairojas
- Limfedēma
- Tūska pēc traumas/operācijas
- Cirkulācija hronisku tūsku
- Lipedēma, sākot no II stadijas
- Nekustīguma izraisīti sasitumi (artrīga) un tūskas ārstēšana
- Sākotnējās ādas slimības, ekstremitātes pārejas vai sajūtu traucējumi
- Medikamenta izraisīta tūska, ja nav iespējama to nomaiņa
- Aptaukošanās ar funkcionālu vēnu mazspēju

Izcila kvalitāte no uzņēmuma Ofa Bamberg

Valkājot šo Ofa individuālo izstrādājumu, jūs

redzat īpašus rezultātus: Rūpīga aprūde un augstas kvalitātes līmenis tiek nodrošināts un kontrolēti, izmantojot jaunākos tehnoloģijas sasniegumus. Regulārā sertificēšana, ko veic neatkarīgas pārbaudes iestādes, dokumentē mūsu atbilstīgo attiecīgu pret mūsu ražotajiem izstrādājumiem.

Jūs Ofa individuālais izstrādājums atbilst

vissmagākajiem precu un kontroles noteikumiem

pasaulē, kas tiek atbilstīgi uz medicīniskajām

kompresijas zeķēm (RAL-GZ 387/1), kā arī atbilst

drošu materiālu un krāsvielu izmantošanu.

Oeko-Tex standartā 100 prasībām, kas paredz

īpašu drošību un komfortu.

Iai jūs droši turētos uz kājām!

▼ **Ārta konsultācija**
Ja rodas tālāk norādītie simptomi, lūdzu, vērsieties pie ārsta.


▼ **Ārta konsultācija**
Ja rodas tālāk norādītie simptomi, lūdzu, vērsieties pie ārsta.

▼ **Ārta konsultācija**
Ja rodas tālāk norādītie simptomi, lūdzu, vērsieties pie ārsta.

▼ **Ārta konsultācija**
Ja rodas tālāk norādītie simptomi, lūdzu, vērsieties pie ārsta.

▼ **Ārta konsultācija**
Ja rodas tālāk norādītie simptomi, lūdzu, vērsieties pie ārsta.

ofa bamberg

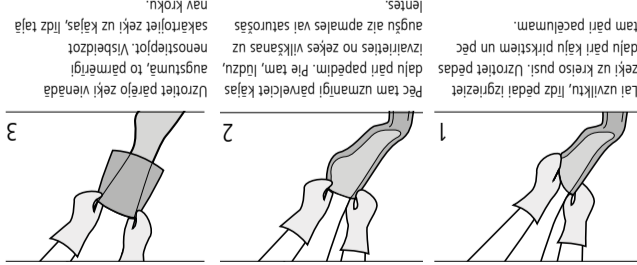

Uzvilkšanas pamācība, sliētas purngals

Uzvilkšanas pamācība, atvērts purngals

Uzvilkšanas pamācība, atvērts purngals

Uzvilkšanas pamācība, sliētas purngals

Uzvilkšanas pamācība, atvērts purngals