

Sukkapassi

Sukkapassi

Mittojen mukaan tehty tuotteesi on valmis!

Muistilappu pesukonetta varten:



Kompressiosukat täytyy pestä oikein

Pese Lastofa Forte -tuotteet oikeinpäin ja Lastofa Extra -tuotteet nurinpäin käännettynä. Ei saa käyttää huuhteluinetta!

- Hienopesu
- Ei saa valkaista
- Varovainen kuivaus
- Ei saa sillittää
- Ei kemiallista pesua

Pesu

- Tuote on heti käyttövalmis.
- Suositus: pese ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Pese päivittäin (enint. 40 °C) joko käsin tai pyykinpesukoneessa hienopesuohjelmalla.
- Pese erillään miedolla pesuaineella (erityisesti sopiva on Ofa Clean Special -pesuaine), älä käytä huuhteluinetta.
- Huuhtelee hyvin, linkoa hellävaroen, mutta älä väännä.
- Kuivata pyyheliinan päällä ilmassa tai kuivaimesi hellävaraisella kuivausohjelmalla, älä koskaan sillitä äläkä kuivata lämpöpatterin päällä tai auringossa.

Materiaalit

Valmistusmateriaaleina käytetään polyamidia (Polyamid), elastaania (Elastan) ja puuvillaa (Baumwolle) tai merinovillaa (Merinowolle). Konkreettiset tiedot näkyvät sukkaan ommellussa tekstiilitietoketissä.

Hoito

- Säilytä kuivassa, mieluiten alkuperäisessä pakkaussessa, suojattuna suoralta auringonpaisteelta ja lämmöltä.
- Älä käytä silikonipintaaisilla tarttumareunoilla varustettuja sukkiä liuottimien, salvojen, rasvojen tai rasvaa palauttavien pesunesteiden kanssa, koska ne saattavat heikentää sukan tarttumiskykyä pysyvästi.
- Huolehdi ehdottomasti jalkojen säännöllisestä hoidosta ja moitteettomista jalkineista.
- Kuitunyyppöjen syntyminen (nyppyyntyminen) on tavannaista tekstiileille eikä sitä voi käyttää reklamaation perusteena.
- Älä koskaan korjaa sukkin vaurioita itse, vaan tuo ne takaisin alan ammattiliikkeeseen, josta sukat on ostettu.

Käyttötarkoitus

Kompressiosukkiä käytetään käsivarsien ja jalkojen laskimoveren- ja lymfakiertosairauksien sekä lipedeeman hoidossa. Valittavissa on eri tuotteita käyttöaiheen mukaan.

Lääkinnällisten tukisukkien toimintaperiaate

Käyttöaiheen mukaisesti määrätty tuote ja hallittu paine nopeuttavat veren takaisinvirtausta, mikä parantaa kudosten mikroverenkiertoa ja lymfivirtausta.

Tärkeitä ohjeita

- Keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin alat käyttää kompressiosukkiä.
- Hoidolla on paras teho, kun sukkiä käytetään päivittäin ja kontrollitarkastuksessa käydään säännöllisesti.
- Vain lääketieteellisen koulutuksen saaneet ammattilaiset saavat luovuttaa sukat käyttöön ja neuvoa niiden oikeaoppisessa pukemisessa.
- Akuutin jalkakivun tai iho-oireiden ilmetessä on hakeuduttava välittömästi lääkäriin.
- Ihoärsytysistä voi estää siirtelemällä tarttumareunaa säännöllisesti.
- Ota laatuongelmien yhteydessä tai reklamaatiotilanteissa yhteyttä alan ammattiliikkeeseen.

Rev. 1/04/21



Ofa Bamberg GmbH

Labanger 20
D-96052 Bamberg

Tel. + 49 951 6047-777
Fax + 49 951 6047-186

export@ofa.de
www.ofa.de

Alain liikettä varten: sukka tiedot arkistointia varten

